

Keramik Ätzgel
Gel pro leptání keramiky

Informace a návod k použití

Obsah:

1 x 6 ml

Aplikační láhev

D-63654 Büdingen Telefon: 06042 / 88 00 88

Bezpečnostní pokyny:

Produkt obsahuje kyselinu fluorovodíkovou!

- jedovatý při vdechnutí, požití nebo potřísnění pokožky.
- gel způsobuje poleptání. Zamezte kontaktu s pokožkou, očima a měkkými tkáněmi. Při kontaktu omyjte velkým množstvím vody. Konzultujte s lékařem.
- držte mimo dosah dětí!
- pouze pro extraorální použití!
- láhev po použití okamžitě uzavřete.
- neskladujte při teplotách nad 25° C.

Obecné:

M+W Keramik Ätzgel je gel kyseliny fluovodíkové pro leptání keramických restaurací.

Přednosti:

Adheze upevňovacích kompozitů a keramickou plochou se díky vytvoření retenčního leptání vzoru výrazně zvýší.

Červené zbarvení zaručuje dobré rozeznání a ohraničení.

Optimální konzistence gelu umožňuje lehkou a precizní aplikaci.

Aplikační oblast:

Plně keramické restaurace jako inlaye, onlay, dýhy nebo korunky.

Aplikace:

1)

M+W Keramik Ätzgel naneste jednorázovým štětcem nebo plastovou tyčinkou plochu keramiky určenou k leptání.

2)

Doporučená doba leptání minimálně 60 sekund.

3)

Po ukončení působení je třeba zbytky kyseliny zcela odstranit. Pro to je třeba intenzivně tyto plochy postříkat párou, ošťříkat vodou nebo vyčistit v ultrazvukové lázni s destilovanou vodou.

Důležité pokyny:

Leptání keramických ploch je třeba provést bezprostředně před spojením, resp. po vyzkoušení.

Je třeba zamezit kontaminaci leptaných ploch. (Nekartáčovat).

Pokud by přesto po procesu leptání ke kontaminaci došlo, je nutno opět krátce leptat (cca 10 sekund).

Po ukončení leptání dobře osušte, v aplikaci dále pokračujte podle pokynů výrobce.

M+W Keramik Ätzgel nesmí být používán k leptání skloviny v ústech!

Při aplikaci alternativních Bonding systémů např. oxidovou keramikou (lepicí technika), je možno od aplikace **M+W Keramik-Ätzgelu** upustit.

Pouze pro extraorální použití! Skladujte při pokojové teplotě při teplotách nižších než 25° C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.



Datum poslední revize 02/2010